

Anlegen und Sitz


Vor dem Anlegen der Maske Hände waschen oder desinfizieren.



1 Maske öffnen und Kopfbänder parallel ziehen

2 Maske über Nase, Mund und Kinn halten, mit einer Hand auf der Aussenseite leicht am Gesicht fixieren und mit der freien Hand die beiden Haltebänder über den Kopf ziehen

3 Unteres Halteband unter die Ohren ziehen, oberes Halteband über den Hinterkopf ziehen

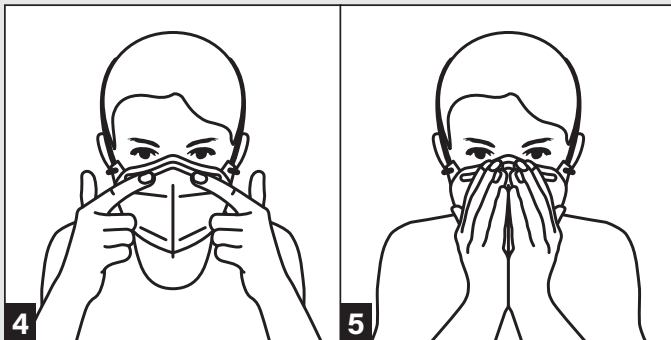

4 Nasenclip mit beiden Zeigefingern an Gesichtsform andrücken

5 Überprüfen, ob die Maske korrekt und dicht sitzt. Scharf einatmen; bei Undichtheit Sitz erneut anpassen

! Warnhinweise

- Die Maske muss eng anliegen und Mund sowie Nase vollständig abdecken.
- Falls sich unterhalb der Abdichtungslinie Gesichts- und/oder Barthaare befinden, kann die Wirksamkeit der Maske nicht mehr gewährleistet werden.

Entfernen und Entsorgen der Maske

1. Brillenträger: Brille absetzen
2. Haltebänder mit beiden Händen fassen, über den Kopf streifen und mit der Maske vom Gesicht entfernen
3. Maske, ohne den Maskenteil zu berühren ablegen und spätestens nach Schichtende in geschlossenem Abfallbehälter entsorgen
4. Hände reinigen
5. Brillenträger: Brille wieder aufsetzen

Lagerung und Transport

Das Produkt muss in der Originalverpackung gelagert und transportiert werden. Weitere Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit siehe Informationsbroschüre des Herstellers.

Verpackungseinheiten

- Erstverpackung: Beutel à 50 Masken
- Zweitverpackung: Faltschachtel à 50 Masken
- Drittverpackung: WP-Box à 10 FS = 500 Masken pro WP-Box (IM: 769x316x242 mm, AM: 777x324x257mm)
- Transporteinheit: 21 WP-Boxen pro Palette = 10'500 Masken (3 Boxen pro Lage, 7 Lagen pro Palette, Totalhöhe der Palette 1,944 m)



Kontakt

sales@flawaconsumer.com
T +41 71 394 91 11